



Esteem™ Uma Peça com Tecnologia Moldável ConvaTec

Poderosa proteção contra complicações da pele e vazamentos.

Tecnologia Moldável
ConvaTec - Liberdade e
confiança para viver a vida
ao máximo.

95,6%

das pessoas que passaram a
utilizar a Tecnologia Moldável
ConvaTec mantiveram a pele
saudável.¹

86,2%

das pessoas que mudaram
para a Tecnologia Moldável
ConvaTec melhoraram sua
condição de pele.¹

ICC	CÓD. SAP	CÓD. INTER	DESCRIÇÃO
413515	BR10364	1708116	Bolsa Moldável/dren. Tr. Filt 20-30mm 10un
413516	BR10365	1708117	Bolsa Moldável/dren. Tr. Filt 30-40mm 10un
413521	BR10368	1708122	Bolsa Moldável/dren. Op. Filt 20-30mm 10un
413522	BR10369	1708123	Bolsa Moldável/dren. Op. Filt 20-40mm 10un



É hora de experimentar a Tecnologia Moldável ConvaTec.
Ajuste perfeito. Pele mais saudável.

References: 1. Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hölzel-Piontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Poster presented at ECET, Paris, France, June 2013.
TM indicates trademarks of ConvaTec Inc. © 2014 ConvaTec Inc. AP-014415-MM

 **ConvaTec**



Esteem Plus Moldável

Guia de Aplicação

Instruções de uso *

BOLSA
FECHADA



DISCO MOLDÁVEL
BASE ADESIVA
BOLSA



BOLSA
DRENÁVEL

Como usar



Se você estiver usando uma bolsa drenável, assegure-se que esteja bem fechada



Remova o disco moldável da base da Esteem™ e aqueça entre as mãos



Remova a Aba 1



Enrole o disco de resina e molde-o de acordo com o tamanho do estoma (não estique, puxe ou corte)



Remova a Aba 2 - aplique a base adesiva no corpo



Ajuste o disco moldável ao corpo e assegure que esteja bem ajustado ao estoma e à pele (Aba 3 deve estar voltada para baixo)



Remova a Aba 3



Remova a película da base adesiva utilizando a aba azul uma Bolsa Esteem™



Una a base e a bolsa levemente e cole a base ao disco, de baixo para cima



Utilize a janela transparente da bolsa para verificar se foi aplicada da maneira correta

11294

Para mais informações sobre o produto, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do número **0800-7276-115**

* Veja as instruções completas de uso na bula, no interior da caixa



ConvaTec